


Andarilho new design

W2230 001 001

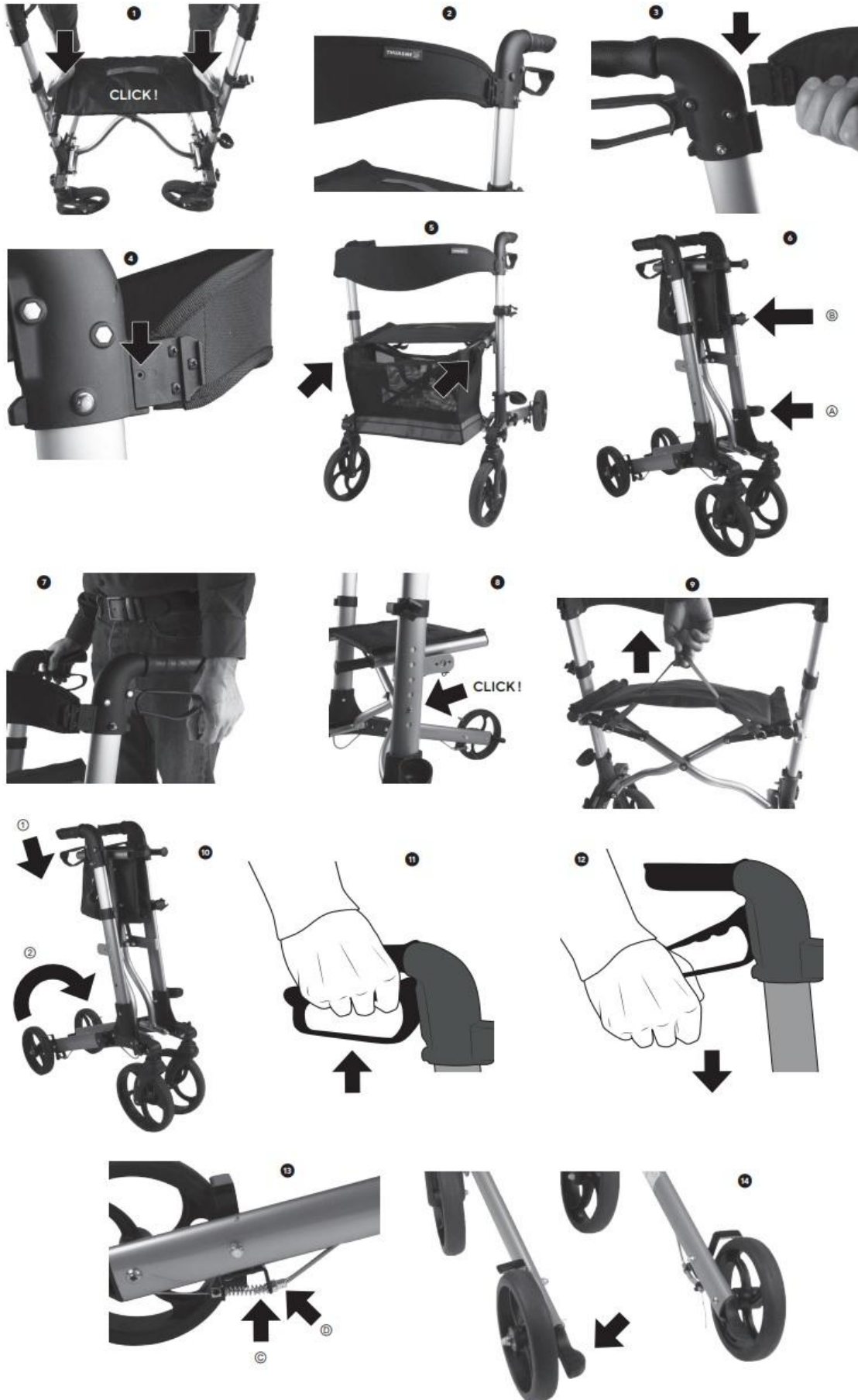

DESCRIÇÃO/USO

Andarilho de 4 rodas.

Este dispositivo permite às pessoas com mobilidade temporária ou permanentemente reduzida facilitar os seus movimentos, fornecendo-lhes um ponto de apoio adicional. Está igualmente equipado com um assento com encosto para pequenas pausas. Pode ser utilizado dentro e fora de casa.

PRINCIPAIS COMPONENTES

Estrutura: alumínio

Pegas: PU

Assento (tampa): nylon

Encosto (estofos): nylon

Rodas/pneus: elastómero termoplástico

Transporte: nylon/malha

INDICAÇÕES

Apoio pós-operativo e pós-traumático.

Fraqueza, distúrbios/afeções neuromusculares, instabilidade, perda de equilíbrio, artrose dos membros inferiores.

Doenças degenerativas dos membros inferiores.

CONTRA-INDICAÇÕES

Não adequado para doentes com peso > 130 kg.

Não utilizar em caso de alergia conhecida a um dos componentes.

Não utilizar em caso de perturbações funcionais graves da percepção ou perturbações graves do equilíbrio.

PRECAUÇÕES



Avisos importantes

Verificar a integridade do dispositivo antes da sua utilização.

Não utilizar o dispositivo se este estiver danificado.

Antes de utilizar o produto, verifique:

- que é estável e rígido,
- que os travões estão a funcionar corretamente
- que as rodas estão em bom estado e giram livremente,
- que todas as peças estão fixas de forma segura e aparafusadas.

O profissional de saúde que entrega o produto deve garantir que o produto é adequado para o paciente.

Recomenda-se que um profissional de saúde efetue a montagem e ajuste do dispositivo e supervisione a primeira utilização.

Em particular, a tensão dos cabos dos travões deve ser verificada e ajustada, se necessário.

Seguir o conselho do profissional de saúde que prescreveu ou entregou o produto e consultá-lo em caso de dúvida.

Não utilizar os dispositivos para qualquer outro fim que não seja a sua utilização prevista: risco de ferimentos ou danos materiais.

Não permitir que as crianças brinquem com o produto.

Preste atenção ao risco de beliscar ao manusear o dispositivo.

Desdobrar sempre completamente o andarilho antes de o utilizar.

Não fazer quaisquer modificações mecânicas no dispositivo; a segurança do dispositivo pode ficar comprometida. Só podem ser utilizadas peças sobressalentes e acessórios originais.

Utilizar o dispositivo com cuidado em superfícies escorregadias (chão molhado, com neve, gelado, azulejado, etc.), irregulares, inclinadas ou instáveis (cascalho, areia, folhas, etc.).

Não utilizar em escadas fixas ou mecânicas.

Não exponha à luz solar directa durante longos períodos de tempo.

Verificar a temperatura das superfícies do dispositivo, em particular antes de se sentar no banco: risco de queimaduras.

Efeitos secundários indesejáveis

- Risco de desconforto se o dispositivo for ajustado incorretamente.
- Risco de perda de equilíbrio ou de queda, o que pode levar a lesões graves.

Qualquer incidente grave que envolva o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o doente se encontram estabelecidos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

INSTALAÇÃO

1. O posicionamento das rodas

Soltar e retirar a peça de apoio da roda traseira e dobrar o suporte da roda até que os furos estejam alinhados. Voltar a montar a roda, assegurando que está totalmente aparafusada.

Proceder da mesma forma com a roda da frente. Depois colocar o andarilho do outro lado e repetir os mesmos passos.

2. Abertura do andarilho

Colocar o andarilho sobre as rodas; puxar as pegas à parte.

Pressionar os tubos laterais do assento até o mecanismo engatar, para bloquear o andarilho na posição aberta. ❶

3. Posicionamento do encosto

Posicionar o encosto ❷ corretamente e deslizar as extremidades do encosto para os apoios de encosto designados ❸.

Em seguida, fixar o encosto apertando os parafusos com segurança. ❹

4. Fixação da alcofa

A alcofa deve ser montada na frente do andarilho nos dois apoios de cada lado do banco. ❺

5. Montagem do suporte de bengala

Fechar a parte ❶ na parte inferior do tubo esquerdo ou direito. A parte ❷ deve ser inserida na ranhura na parte superior do tubo, logo abaixo da pega. ❸

AJUSTE DA ALTURA DAS PEGAS

O ajuste da altura do dispositivo deve ser feito de acordo com a altura do paciente. O ajuste inadequado pode limitar o desempenho e levar a uma tensão excessiva para o utilizador. A parte superior do punho deve estar aproximadamente ao nível do pulso quando os braços do utilizador estão posicionados ao lado do corpo e o utilizador está a usar o seu calçado habitual. ❹

- Premir os botões e puxar a pega ao mesmo tempo para ajustar a altura. Certifique-se de que as pegas estão fixas com segurança à mesma altura em ambos os lados. Antes de usar, verificar se os botões de pressão estão bem fechados no lugar. ❺

DOBRAGEM

- Para dobrar novamente o andarilho, puxar a correia do assento para cima. ❻ Uma vez dobrado, o andarilho fica de pé por si só.

- Para dobrar o andarilho completamente de volta à posição dobrada para facilitar o transporte, colocar as pegas na posição rebaixada e dobrar novamente os apoios da roda para trás.

Se necessário, dobrar as rodas de volta em primeiro lugar. ❼

SISTEMA DE TRAVAGEM

- Travagem rápida

Para travar, apoiar-se nas pegas e apertar as manetes de travão. ❶ - Travões de estacionamento.

Para imobilizar o andarilho (por exemplo, antes de se sentar), empurrar cuidadosamente as manetes de travão para baixo até bloquearem (click). ❷

Para retomar a marcha, apertar suavemente as alavancas para libertar os travões.

- Ajustar os travões

- Se a travagem não for suficiente, desapertar a contraporca ❸ e rodar o parafuso de ajuste ❹ no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. ❺

- Se a travagem for demasiado dura, proceder como descrito acima, mas rodar o parafuso no sentido dos ponteiros do relógio. ❻ Não se esqueça de apertar novamente a porca de segurança depois de ter sido feito o ajuste óptimo.

Montagem do apoio para os pés:

- Este andarilho está equipado com um andarilho que lhe permite passar mais facilmente os obstáculos. ❼



Andarilho new design

W2230 001 001

Antes de utilizar o assento:

- verificar se o andarilho é colocado sobre uma superfície estável e plana.
- os travões devem estar na posição de "travão de estacionamento".

Não se sentar de lado e não se inclinar para um lado ou para trás.

O assento do andarilho destina-se apenas a uma utilização de curto prazo.

Não pendurar sacos, cestos ou objectos que não sejam os fornecidos com o dispositivo: risco de tombar.

O dispositivo não deve ser utilizado como suporte para se levantar de uma posição sentada: risco de desequilíbrio.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

MANUTENÇÃO

Se qualquer parte do dispositivo ficar solta, fora de ajuste ou visivelmente danificada, contactar um revendedor especializado ou um profissional de saúde.

Se necessário, estão disponíveis peças sobressalentes e acessórios originais no seu distribuidor Thuasne.

Limpar com um detergente suave e um pano macio.

Nunca limpar as pegas e rodas com substâncias oleosas: risco de escorregamento.

Se necessário, utilizar um desinfectante de superfície suave ou álcool a 70°. Nos estabelecimentos colectivos, seguir as recomendações do responsável pela higiene.

Fabricante:

THUASNE

120 rue Marius AUFAN 92300 Levallois – Perret - France