

## Joelheira **ligamentar com reforços laterais**

### Composição:

Poliamida - Poliéster - Elastano - Poliuretano - Silicone.

### Tabela de medidas:



1	32 - 34 cm
2	35 - 37 cm
3	38 - 41 cm
4	42 - 45 cm
5	46 - 49 cm
6	50 - 53 cm

### Manutenção:

É preferível retirar os reforços laterais para proceder à limpeza. Para tal:

1.Retirar as tiras.

2.Puxar a parte superior da joelheira por forma a retirar a extremidade superior dos reforços laterais.

### Precauções:

Seguir os conselhos do profissional que recomendou ou vendeu o produto.

A utilização deste produto, como acontece com qualquer produto de compressão, pode causar em algumas pessoas reações cutâneas (vermelhidão, eritemas).

Neste caso, pode ser preferível reajustar ou tirar o produto e pedir conselho ao profissional que entregou o produto.

Armazenar a temperatura ambiente, de preferência na caixa de origem.

Por questões de higiene e de performance, não reutilizar o produto para outro paciente.

Este produto é um dispositivo médico de classe I segundo o regulamento europeu 745/2017.

### Efeito colateral indesejado:

Quaisquer incidentes graves relacionados com o dispositivo devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou doente reside.

### Fabricante:

THUASNE

120 rue Marius AUFAN 92300 Levallois – Perret - France

